

MASQUE BARRIÈRE COVID-19 RÉUTILISABLE ECOLOGIQUE

Le produit en bref

- 100% Swiss Made
- Tricot en 3D avec fils antibactériens : Forme anatomique, légère et confortable
- Brides intégrées sans coutures
- Certification selon norme AFNOR en cours
- Emballé dans une pochette protectrice zippée réutilisable

Ecologique et économique

- Garanti minimum 40 lavages.
- Ecologique car réutilisable sans perte d'efficacité
- Durée d'utilisation journalière prolongée

Entretien

- Lavage en machine à 60° C pendant 30 minutes
- Ou désinfecter avec du Pantasept Spray (laisser agir 2 min), puis rincer dans de l'eau chaude à 70° pendant 2 min.
- Séchage complet dans les 2 heures qui suivent le lavage avec sèche-linge ou sèche cheveux.
- Repasser à 120° (entre laine et soie)

Mettre le masque

- Se laver les mains
- Insérer le pince-nez dans le masque
- Appliquer le masque sur le visage avec une main
- Installer les attaches autour des oreilles avec l'autre main
- Contrôler le plaquage du masque
- Durée d'utilisation en continu recommandée ne **devrait pas dépasser 4h**

Enlever le masque

- Avant de retirer le masque, se laver ou se désinfecter les mains
- Retirer le masque en saisissant les élastiques sans toucher l'avant
- Laver ou désinfecter le masque avant de le réutiliser
- **Retirer le pince-nez avant le lavage**

Le dispositif « masque barrière » est destiné à compléter les gestes barrières et les règles de distanciation sociale. Il est destiné au grand public et notamment à toute personne saine ou asymptomatique.

Plus sous : xeropharm.ch/masque